


ニードルレス シリンジ US PAT.

# Ajex<sup>®</sup>



【認証番号】 22500BZX00545000

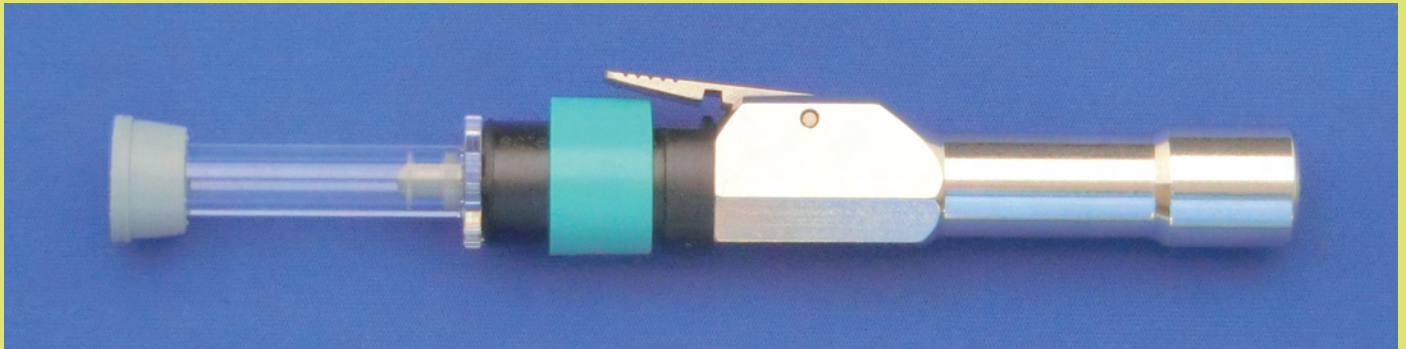

特長

- 針を使用せずに皮下へ投与
- 簡単操作
- 注射針由来の医療事故皆無
- 単回使用、使い捨て
- 特殊成形技術による高い耐衝撃性

薬液拡散イメージ

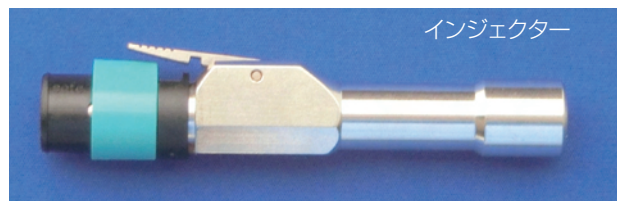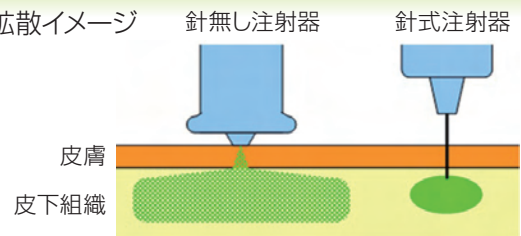

使用手順



手順①  
アンプルを  
インジェクターにセットする



手順②  
キャップを外す



手順③  
安全装置を解除する



手順④  
先端を皮膚に密着させ、トリ  
ガーを押すことにより注射